

A mintavétel - a DNS minta levétele

Az alábbi útmutatást kérjük alaposan olvassa át és tartsa be annak rendelkezéseit. A minták helyes levétele lényeges alapja a jövőbeli analízisnek

1. A kutyus vagy cica ne igyon, egyen legalább két órával a mintavétel előtt semmit.
2. Nem vattás végén tépje le a tasak végét, húzzák ki a steril pálcát. A vattához ne érjenek.
3. Vattás részt a nyitott száj alsó-felső fogsor közötti szájüreg jobb - és baloldali részén törölgessük azaz a pofaredő belső felén, forgassuk, húzogassuk meg a pálcát nekinyomva, minél több sejt kerüljön a vattára. Vegyük elő a második pálcát és ugyanezt a műveletet végezzük el (tartalék pálcá)
4. A vattás pálcikát biztonságos helyen szobahőmérsékleten 15 percig szikkasszuk, vigyázzunk ne érjen a vattás részhez semmi.
5. Szárítás után (15 perc) behúzzuk a pálcikákat az eredeti csomagolásban .Ráírjuk az állat nevét vagy a chip számát