





NÁVOD NA ODBER VZORKY STEROVOU TYČINKOU

1

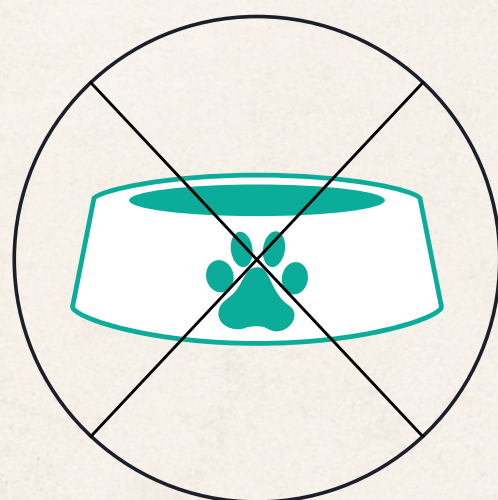


Odber treba uskutočniť nalačno,
prípadne 2 hod. po jedle.

2

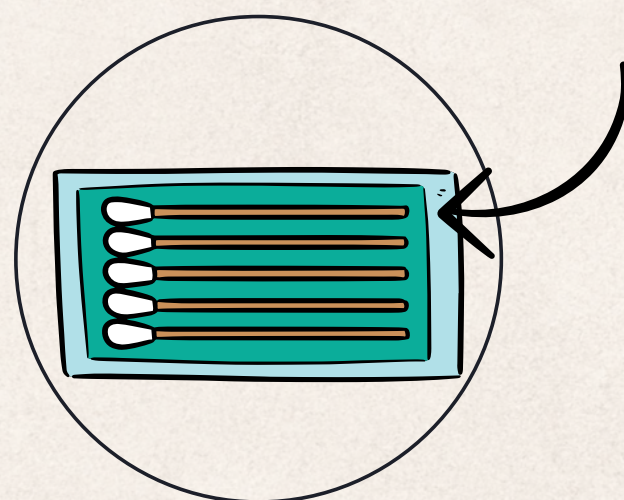


Otvorte odberovú sadu na opačnej
strane ako sa nachádza vata.

3

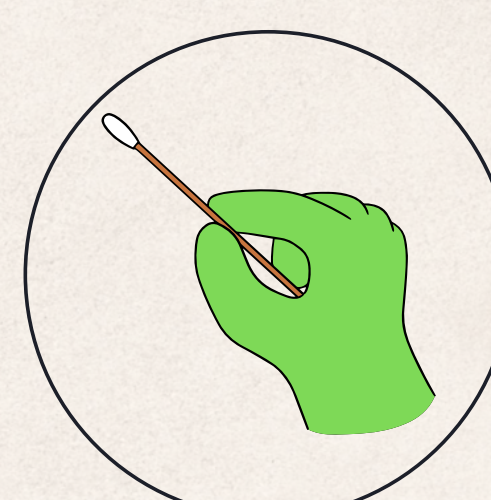


Odberový tampón uchopte na drevenom
konci a vyhýbajte sa dotyku vatového
konca.

4

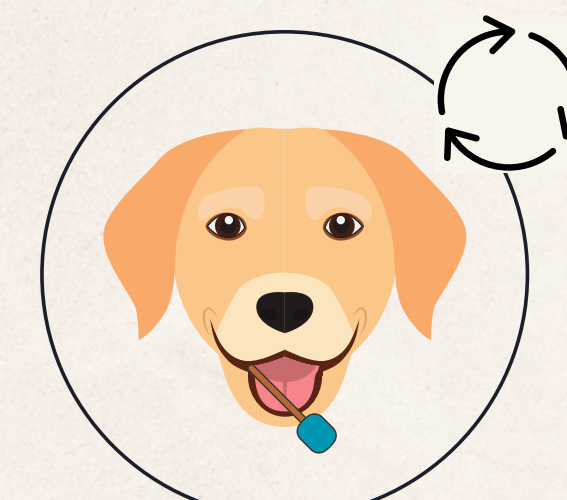


Krúživými pohybmi 5-10 x zotierajte
vatovou časťou lícnu sliznicu. Jedným
tampónom zotierajte pravú a druhým
tampónom ľavú lícnu sliznicu.

5

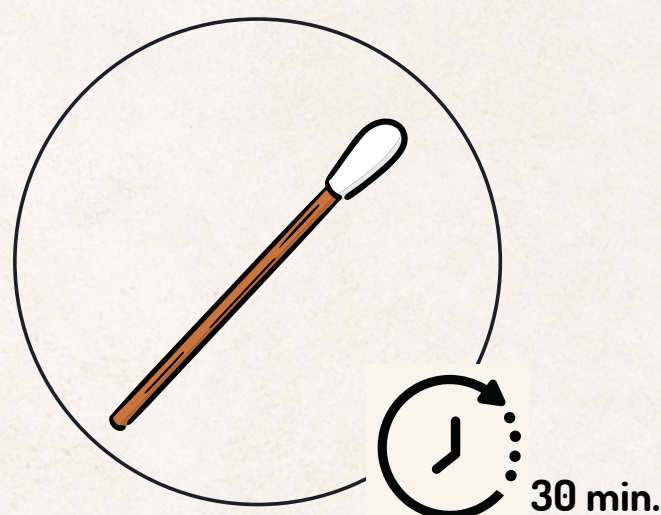

Odberové tampóny nechajte
vyschnúť asi 30 minút na vzduchu.
Zabráňte akémukoľvek dotyku
vatového konca s okolím.

6

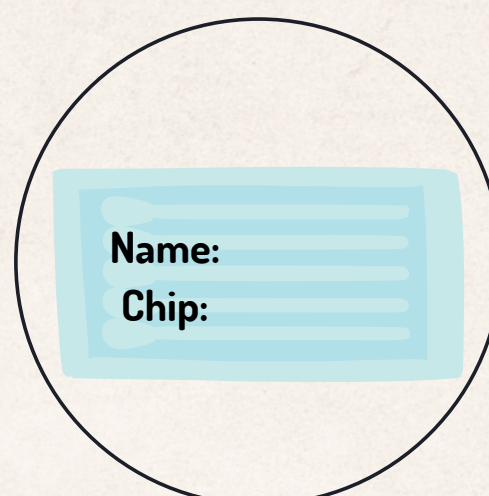

Po vyschnutí zasunúť odberové
tampóny do ich pôvodného obalu
a označte obal menom zvieraťa a/alebo
čipovým číslom zvieraťa.

7



Vytlačte a vyplňte
objednávkový formulár.

8



Označenú vzorku spolu s vypísaným
objednávkovým formulárom odošlite
na adresu laboratória.