

Návod na odber vzorky steroidovú tyčinkou

Na odber vzoriek z ústnej dutiny Vám zasielame sterilné odberové sety.

Na jedno zviera použite prosím, obidva odberové tampóny (2 vatové tyčinky obsiahnuté v jednom odberovom sete).

1. Odber treba uskutočniť nalačno, poprípade 2 hodiny po jedle
2. Otvorte odberovú sadu na opačnej strane ako sa nachádza vata
3. Odberový tampón uchopte na drevenom konci a vyhýbajte sa dotyku vatového konca
4. Krúživými pohybmi 5 až 10 krát zotierajte vatovou časťou lícnu sliznicu. Jedným tampónom zotierajte pravú a druhým tampónom ľavú lícnu sliznicu.
5. Odberové tampóny nechajte vyschnúť asi 30 minút na vzduchu. Zabráňte akémukoľvek dotyku vatového konca s okolím
6. Po vyschnutí zasunúť odberové tampóny do ich pôvodného obalu a označte obal menom zvieratá alebo číslom zvieratá.